






Purger maintenant ou à la fin de la programmation

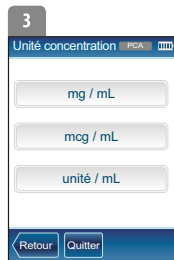

Sélectionner l'unité du médicament.

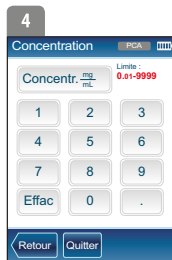

Entrer la concentration, puis valider.

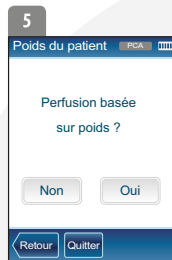

Choisir, puis valider.



Choisir l'unité de débit.



Entrer le volume à administrer, puis valider.



Entrer le débit continu (entrer « 0 » si nul), puis valider.




Entrer la dose bolus, puis valider.



Entrer la période d'interdiction, puis valider.




Entrer le nombre de bolus max. par 1h ou 4h, puis valider.

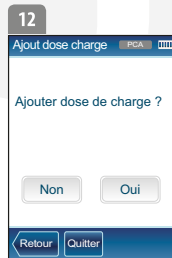

Ajouter dose de charge si besoin.



Valider la programmation (2 pages), sinon modifier avec [retour].

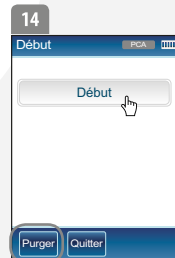

Purger si besoin.

