


Pompe ambulatoire Rythmic™ Evolution Mode Condensé


1 -Appuis long sur ON/OFF pour mettre sous tension ou pour éteindre la pompe.

2 -Code d'accès à la programmation:



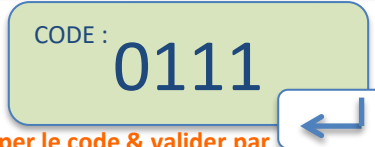


Taper le code & valider par

3 -Programmation:

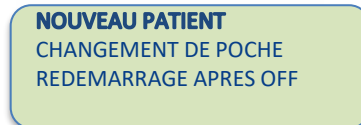

Selectionner avec ▼▲

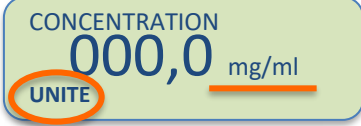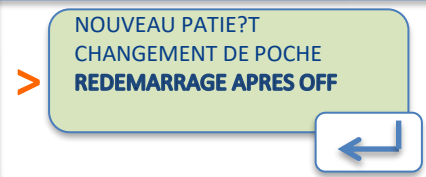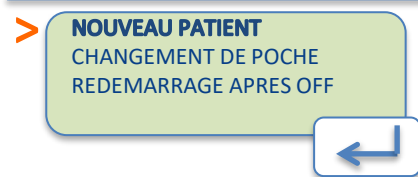


VERIFIER L'UNITE DE PRESCRIPTION
Si la prescription est en ml
Appuyer sur UNITE et modifier par ml
Puis insérer les valeurs prescrites





Insérer volume de la poche




Dans menu HSI TO Remettre compteur à zero selon le protocole

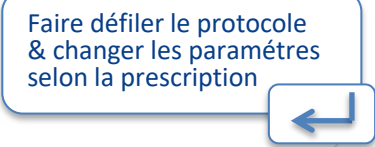

4 -Double appuis pour démarrer et sécuriser la programmation

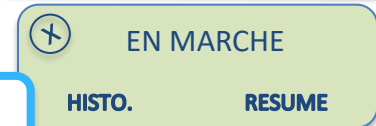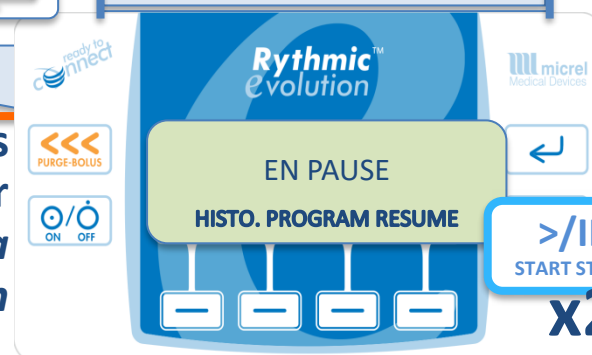


5 -Si message de prevention ou de purge obligatoire

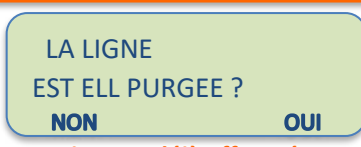

Si purge déjà effectuée, appuyer sur OUI pour démarrer la perfusion



Sinon, appuyer pour lancer purge automatique 3ml & appuer à nouveau pour stopper la purge avant de lancer la perfusion

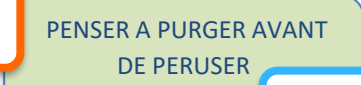

6 - Modifier la programmation en cours de perfusion

Pompe ambulatoire Rythmic™ Evolution Mode Condensé



EN PAUSE
HISTO. PROGRAM RESUME

Appuyer sur "PROGRAM"

0111

Insérer le code de programmation puis valider

EN PAUSE
BOLUS MEDECIN PROGRAM

Adresser un bolus médecin

BOLUS MEDECIN
XX,X ml

Changer paramètres selon la prescription

EN PAUSE
BOLUS MEDECIN PROGRAM

Modifier le protocole en cours

DEBIT
XXX,X mg/hr

Changer paramètres selon la prescription

DOUBLE APPUIS SUR START POUR PERFUSER XX,X ml ET CONTINUER

>||| X 2
START STOP

Faire defiler le protocole & changer les paramètres selon la prescription

-Puis reprendre la perfusion



EN PAUSE
HISTO. PROGRAM PROTOCOL

>||| X 2
START STOP

-Interpréter les alarmes, appuyer sur [Left Arrow] pour acquitter l'alarme

PRE ALARME
PILE FAIBLE <|||

Reste 12h at 2ml/h
Changer la pile ou connecter l'adaptateur secteur

PRE ALARME
FIN DE PERFUSION <|||

Volume restant à perfuser < 3ml
(Configuration de la pompe par défaut)

Pas d'alarme
air !

Bulles d'air éliminées par le filtre de la tubulure

STOP
PILE USAGEE <|||

Mettre sur "Off" et changer la pile alkaline 9V

STOP
FIN DE PERFUSION <|||

Mettre sur "Off" et changer la poche

ALARME
ERREUR : C-xx

Alarme technique, vérifier Interférences électromagnétiques
Eteindre la pompe puis rallumer au bout de 30 sec.
Confier la pompe à un technicien agréé si message persistant

OCCLUSION
AVAL
HISTO. RESUME

Reprise automatique quand l'occlusion est levée (selon configuration)

STOP
VOLET OUVERT <|||

Vérifier le volet de fermeture du segment de pompe